


# BAIGNOIRE À HAUTEUR VARIABLE AUTHENTIQUE

## SCHÉMA D'INSTALLATION

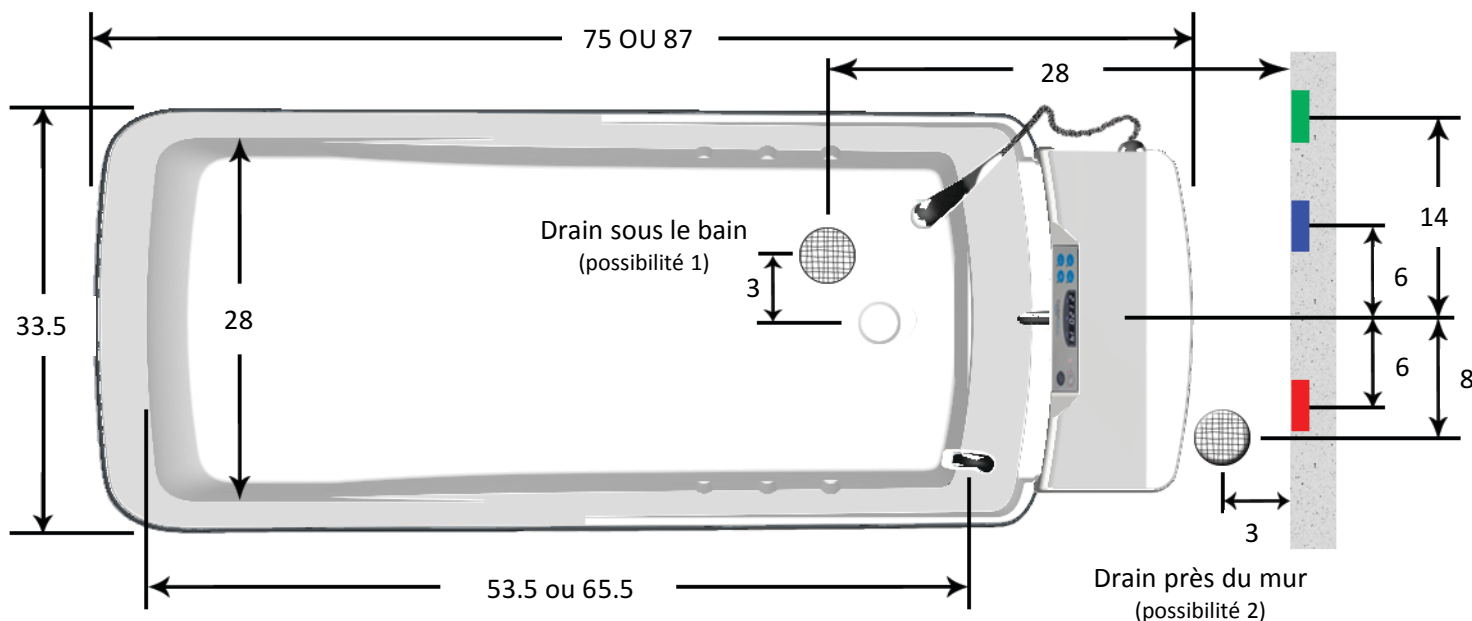

### PLOMBERIE

Les sorties d'eau chaude/froide doivent être munies d'une valve 1/2" NPT; à une hauteur d'environ 24 pouces. Un drain au plancher de 2 pouces de diamètre doit être installé sous la cuve (possibilité 1) ou près du mur (possibilité 2). Laissez le drain sortir min. 2 pouces au-dessus du plancher pour faire le raccord.

### ÉLECTRICITÉ

Une prise électrique trois fiches 120 volts, 15 ampères de type disjoncteur de fuite à la terre (Ground Fault Interrupter (GFI)) doit être installée à une hauteur de 14 pouces et le plus loin possible du drain au plancher; distance minimale de 28 pouces.

### INSTALLATION

Tous les travaux de plomberie, de plancher, de peinture et d'électricité doivent être terminés avant l'installation du bain.






### LÉGENDE

- PRISE ÉLECTRIQUE MURALE
- SORTIE D'EAU CHAUDE
- SORTIE D'EAU FROIDE
- DRAIN




*\*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES*

BAIN AUTHENTIQUE - SCHÉMA DIMENSIONNEL  
CUVE LONGUE À DOSSIER DROIT

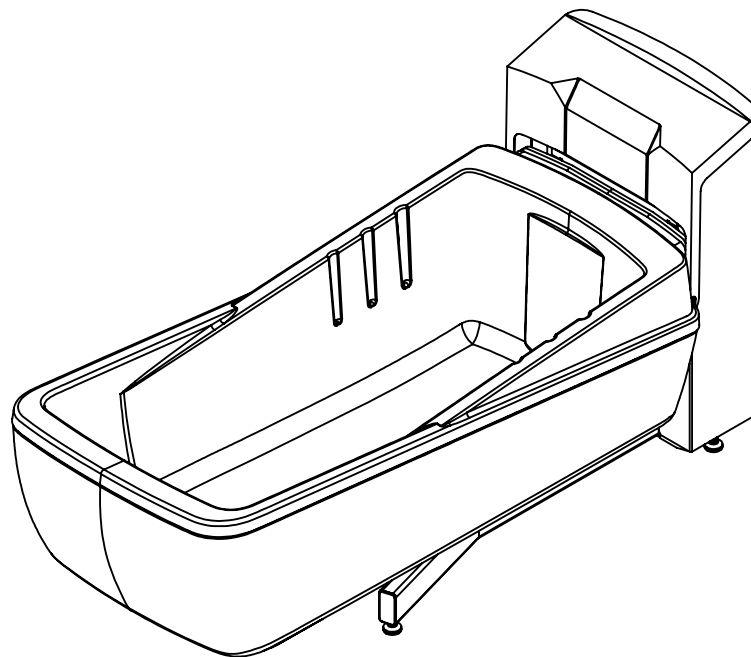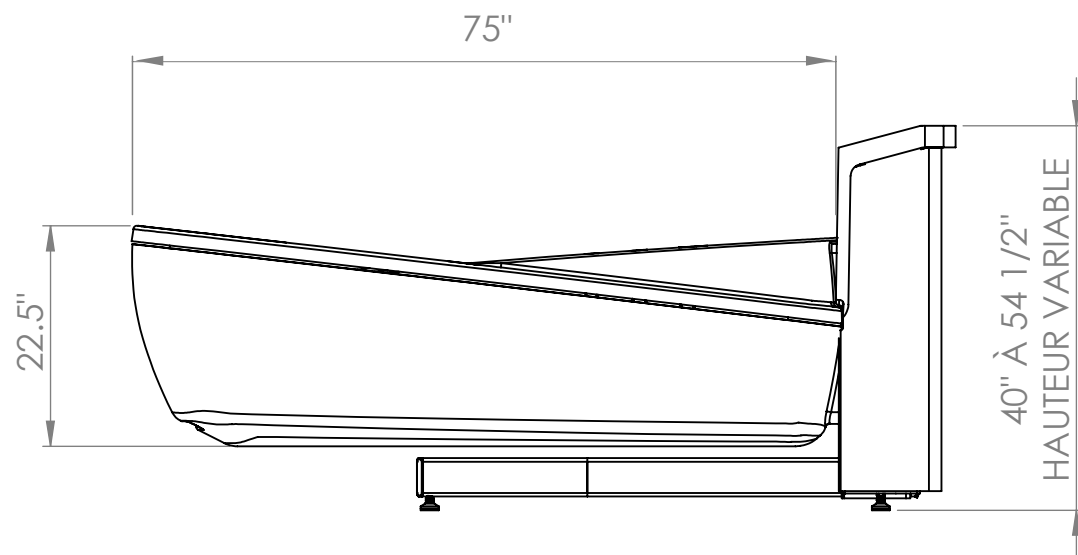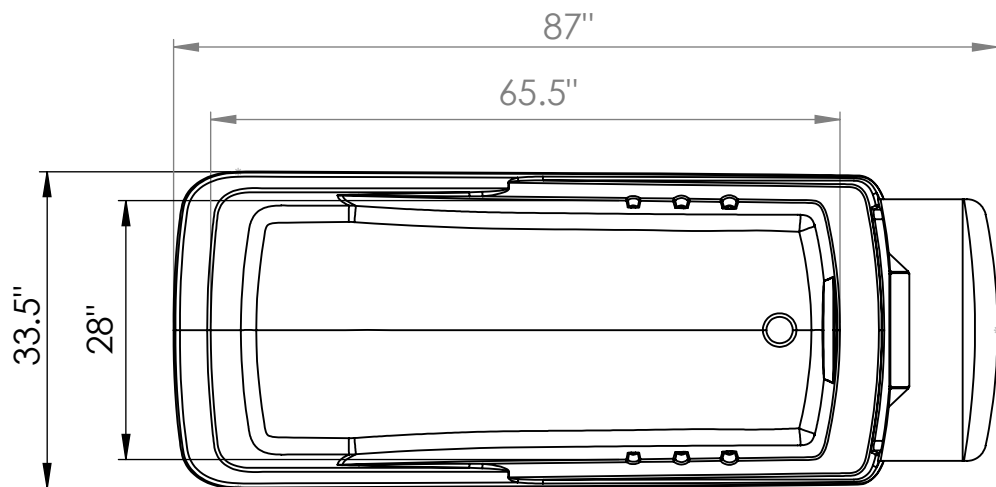

**NOTE:** LES DIMENSIONS TANT INTERNES QU'EXTERNES SONT LES MÊMES POUR LA CUVE LONGUE À DOSSIER INCLINÉ.

BAIN AUTHENTIQUE - SCHÉMA DIMENSIONNEL  
CUVE COURTE À DOSSIER DROIT

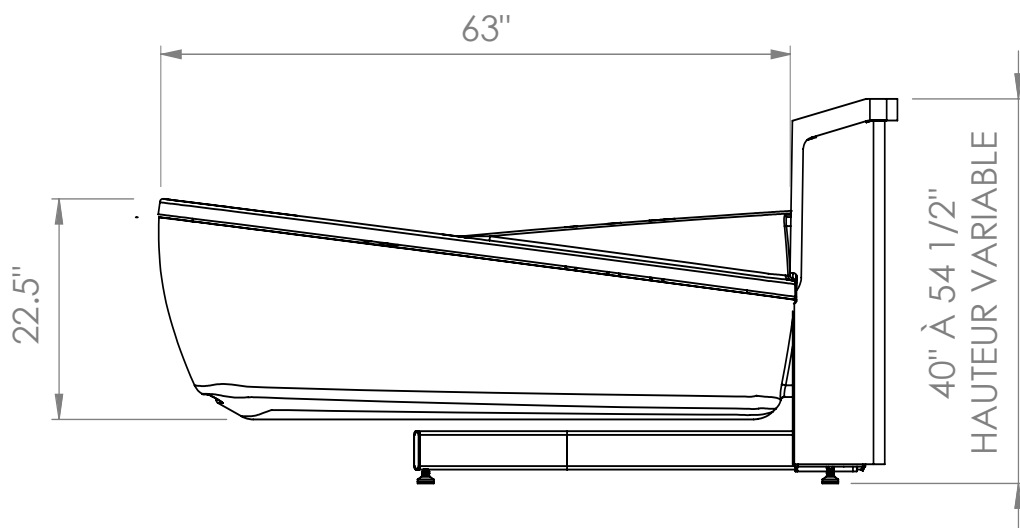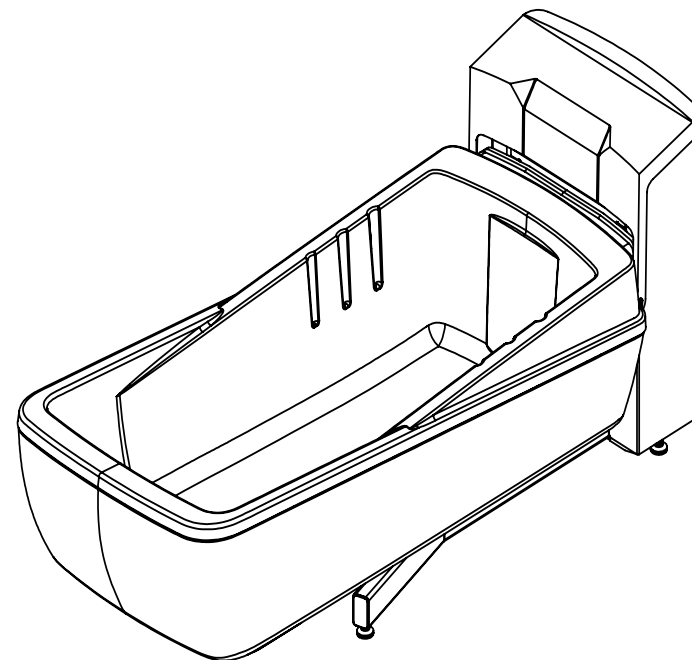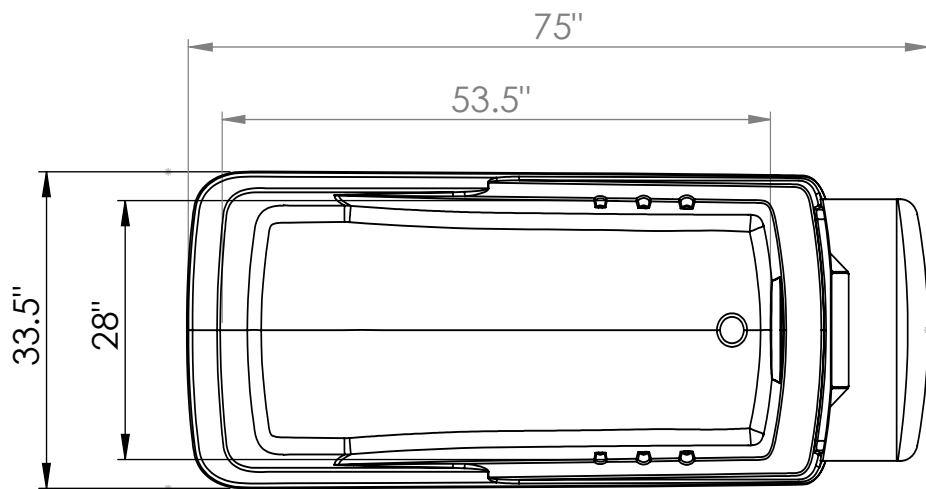

**NOTE:** LES DIMENSIONS TANT INTERNES QU'EXTERNES SONT LES MÊMES POUR LA CUVE COURTE À DOSSIER INCLINÉ.

# BAIGNOIRE À HAUTEUR VARIABLE

## Authentique

Requis pour l'installation

**Cette feuille doit être complétée et retournée avant l'installation du bain**

SVP lire attentivement toutes les sections avant de cocher les cases



### Plomberie

Les sorties d'eau, chaude et froide, sont installées. Chacune des sorties est munie d'un raccord 1/2 NPT et d'une valve (robinet) Les sorties d'eau se trouvent à environ 24 pouces du sol (*sinon, spécifier: \_\_\_\_\_ pouces*)

Le drain est situé au plancher\* et a un diamètre de 2 pouces (*sinon, spécifier \_\_\_\_\_ pouces*)

Le drain est situé au plancher à moins de 6 pouces de distance du mur (*sinon, spécifier \_\_\_\_\_ pouces*)

\*Si le bâtiment comprenait déjà un drain mural, veuillez spécifier l'emplacement du drain en hauteur à partir du sol ( \_\_\_\_\_ pouce(s))

et la distance horizontale par rapport à la prise électrique ( \_\_\_\_\_ pouce(s)).

### Électricité

Une prise électrique 120 volts, 15 ampères de type disjoncteur de fuite à la terre (Ground Fault Interrupter (GFI)) est installée

### État Du Plancher

Le plancher est terminé et est libéré de toute obstruction aux alentours de l'emplacement prévu pour le bain

Le plancher est fait de ciment (*Si autre, spécifier: \_\_\_\_\_*)

Le plancher est-il muni d'un dispositif chauffant (plancher chauffant) ? Si oui, contactez ConfortMédic. OUI  NON

### État Des Murs

La plomberie et l'électricité sont terminées, les murs sont peints<sup>3</sup>, il n'y a aucune obstruction du sol jusqu'à une hauteur de 70 pouces.

<sup>3</sup>Les plinthes peuvent être laissées en place. Si le mur est fait de carrelage, celui-ci doit être terminé avant l'installation.

### Accessibilité

Le bain n'est pas installé dans une salle où il est nécessaire de passer par une cage d'escalier et où les accès sont difficiles

ou

Le bain doit être installé dans une salle où il est nécessaire de passer par une cage d'escalier et où les accès sont difficiles, toutefois les arrangements nécessaires seront pris avant l'installation pour assister le technicien de ConfortMédic

Si un ascenseur doit être emprunté, indiquez les dimensions intérieures : \_\_\_\_\_ long, \_\_\_\_\_ largeur, \_\_\_\_\_ hauteur

Les corridors à emprunter sont tous d'une longueur d'au moins 8 pieds, sinon spécifiez \_\_\_\_\_ pieds.

Les portes devant être franchies sont toutes d'une largeur intérieure d'au moins 36 pouces, sinon spécifiez \_\_\_\_\_ pouces

Le bâtiment comprend un quai de déchargement (*si oui, spécifiez la hauteur entre le quai et le sol : \_\_\_\_\_ pieds*) OUI  NON

\*Si possible, joindre des photos montrant l'espace d'installation.

Est-ce qu'un équipement désuet doit être repris : OUI  NON  Doit-il être désinstallé par ConfortMédic : OUI  NON

Nous confirmons que les sorties d'eau, le drain, l'électricité ainsi que l'eau chaude seront conformes et opérationnels au moment de l'installation.

Nous comprenons que des frais supplémentaires s'ajouteront si le technicien doit attendre parce que les requis mentionnés ci-haut n'ont pas été complétés. Nous assumerons aussi les frais reliés à toute autre visite nécessaire due à l'inexactitude des informations fournies.

Nom en lettres moulées: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Bon de commande: \_\_\_\_\_

Adresse du site: \_\_\_\_\_

Nom de la résidence: \_\_\_\_\_